

KITETT FISIO PRO



- Le **bouton de cadence** permet d'ajuster **les cycles d'aspiration**. Le **bouton d'aspiration** gradué de 1 à 9 **permet de régler l'aspiration du minimum au maximum**. Pour **stimuler** la lactation, régler le **bouton aspiration sur 1** (puissance minimal) et le **bouton de cadence sur 120** (cadence maximal)
- **Mettez le tire-lait en marche (position « I »)**. Il convient de commencer par une **phase de stimulation** afin de stimuler l'arrivée du lait et de provoquer le réflexe d'éjection du lait. **Cette phase doit durer 2 min.** en fonction de **votre propre niveau de confort**, vous pouvez **adapter ces paramètres** en **augmentant la force d'aspiration et/ou en diminuant le cycle**.
- **A l'arrivée du lait, diminuez** progressivement la **cadence** en **tournant** le bouton correspondant dans le **sens des aiguilles d'une montre** et **augmentez la puissance d'aspiration** pour obtenir une bonne expression en fonction de votre confort. L'expression lactée est optimale au niveau de dépression maximal et non douloureux.
- Veillez à **vérifier le bon écoulement du lait à l'intérieur du récipient de collecte**.
- En fin d'expression, **arrêtez le tire-lait (interrupteur sur « O »)**.